

# PODOLIX

{yogallery src=[/images/stories/prod/podolix]}

Com a chegada no Brasil de diversas técnicas para confecção de palmilhas, surgiu a necessidade do desenvolvimento de um equipamento totalmente nacional que substituísse ou que concorresse em preço e qualidade com os importados de difícil processo de importação e principalmente pelo alto custo.

Assim nós da Carceroni desenvolvemos um grupo de equipamentos voltados para a avaliação e para a confecção de palmilhas, que consistem em:

- PODOTERMAX (Termomoldadora)
- PODOLIX (Podolixadeira)
- PODOVISION (Podoscópio para avaliação dos pés)
- PODOPRESS (Auxilia na termomoldagem das palmilhas)

{tab=PODOLIX}

A PODOLIX é uma podolixadeira que auxilia na confecção das palmilhas, proporcionando o lixamento e o acabamento de seus elementos e botões em EVA.

Sua estrutura metálica é toda construída em aço carbono e seu acabamento é feito em pintura eletrostática seguindo o mais rigoroso padrão de qualidade, conferindo beleza e resistência a impactos.

Seus eixos são construídos em alumínio diminuindo o seu peso e seus ruídos.

Seus pés possuem um sistema de ventosas que fazem com que as vibrações que possam existir diminuam o efeito vibratório diminuindo assim os ruídos.

A PODOLIX é de fácil manuseio, não requerendo chaves para a troca das lixas de desbastamento, possuindo um sistema de rolete expansivo. Sua lixa escova é toda confeccionada em lamenas de nylon não trançado de alta qualidade, impregnadas com grãos abrasivos e recobertas com resina especial de alta resistência, promovendo um fino acabamento dos elementos e maior durabilidade.

Seu ruído é bem inferior ao das existentes no mercado nacional e das importadas, devido ao desenvolvimento e pesquisa realizada pela Carceroni para atingir este objetivo.

Fazem parte dos acessórios que acompanham a PODOLIX equipamentos de EPI &ndash; Equipamentos Proteção Individual. (Máscara e óculos)

{tab=Características e Acessórios}

#### Características Técnicas:

Tensões: 127/220 V;

Frequência: 60HZ ;

Grau de proteção: IP-44;

Potências: 1/2 cv;

RPM: 3350;

#### Acessórios:

1 Chave de boca 8 mm.

KIT - EPI = Equipamentos para Proteção Individual.

- 1 Óculos para proteção

- 1 Máscara para proteção

- 3 Lixas em diversos grãos de abrasividade: 180 e 220.

{tab=Utilização}

Este equipamento foi projetado e produzido dentro das mais rigorosas normas de segurança, portanto para usufruir melhor dessa segurança e obter o melhor desempenho e funcionamento do seu aparelho, siga estas recomendações.

- **UTILIZAÇÃO:** A utilização da PODOLIX deve ser feita por pessoal devidamente treinado e orientada pelo fisioterapeuta. Não deixe cair nenhuma substância líquida no motor e, ou na caixa de comando da fonte alimentadora, com risco de causar sérios danos ao equipamento.

- **SEGURANÇA:** Por se tratar de equipamento destinado a promoção da saúde, nós da Carceroni nos preocupamos também com a saúde do usuário, portanto mais do que justo que faça parte da PODOLIX + EPI (Equipamento de Proteção Individual), por isso é que recomendamos que as pessoas que possuem cabelos compridos deixem-nos sempre presos evitando qualquer tipo de acidente em que o cabelo se prenda à máquina durante o seu uso. A utilização de óculos de proteção e de máscara anti-pó, também se fará necessária uma vez que as lixas são confeccionadas e pó de vidro e areia em diversos grãos, podendo danificar a visão e o pó que se desprende no momento da lixagem dos elementos poderá também ser inalado.

- **LIMPEZA:** Após o uso da PODOLIX, você poderá utilizar o aspirador de pó para fazer sua limpeza.

- **MANUTENÇÃO:** Não abra o compartimento do motor ou qualquer outra parte da PODOLIX, pois não existem partes reparáveis pelo usuário. Isto sempre deve ser feito por técnicos especializados, devidamente credenciados.

- **TROCA DA LIXA ABRASIVA:** A troca das lixas abrasivas do ROLETE 50 mm. É bastante simples! Com a PODOLIX desligada as lixas ficam praticamente soltas, basta que você as movimente no sentido de retirá-las que elas iram sair com facilidade.

- **TROCA DA LIXA ESCOVA:** Também é bastante simples! Siga o mesmo procedimento anterior com a PODOLIX desligada, Basta usar uma chave de boca de 8 mm, segurar a lixa escova, mas a rosca sendo esquerda o sentido da retirada é invertida, quando você faz o movimento de apertar ela vai se soltar e o inverso é vai se prender. (A Chave de 8 mm acompanha o equipamento).

{tab=Garantia}

#### CERTIFICADO DE GARANTIA:

Este equipamento é garantido pela Carceroni Produtos Médicos e Fisioterápicos Ltda., por um período estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

1º - A Carceroni Produtos Médicos Fisioterápicos Ltda. Assegura ao proprietário consumidor deste equipamento a garantia de 365 dias (90 dias legais mais 275 adicionais). CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO, CONFORME EXPRESSO NA NOTA FISCAL DE COMPRA, que passa a fazer parte deste certificado

2º - NOTA IMPORTANTE: Fica também excluída da garantia os acessórios que acompanham o equipamento.

3º - Este Equipamento perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido ou em desacordo com o seu manual de operação.
- O equipamento for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada.
- O equipamento for ligado à fonte de energia (rede elétrica, pilhas, baterias, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de operação e/ou equipamento.

4º - Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de operação do equipamento, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agente da natureza e acidente.

5º - Excluem-se igualmente desta garantia os defeitos decorrentes do uso do equipamento em serviços que não se destina regular ou em desacordo com o uso recomendado.

6º - As despesas de transporte do equipamento e/ ou do técnico autorizado correm por conta do Senhor consumidor requerente do serviço.

7º - Caso o defeito constatado seja de responsabilidade do fabricante, teremos 90 (noventa) dias úteis para reposição do produto em questão

{/tabs}