

MC FISIO

{yogallery src=[/images/stories/prod/fisio]}

Pensando no conforto dos profissionais, nós da Carceroni não estamos medindo esforços para produzir equipamentos de alta confiabilidade, durabilidade e designer moderno, que possibilitem ao fisioterapeuta desfrutar de todos os recursos que sua técnica manual exige, proporcionando-lhe o melhor desempenho da sua habilidade e também oferecendo ao paciente todo o conforto durante o seu tratamento.

A maca elevadora ou divã elétrico motorizado surgiu da necessidade diária de posicionar o paciente em diversas alturas, para a sua avaliação e tratamento fisioterápico. Surgiu também das dificuldades que os pacientes apresentaram ao ter acesso à mesa de exame, fazendo uso da escadinha que, na maioria das vezes, é muito instável e insegura.

{tab=MC FISIO}

A maca ou divã motorizado para Terapia Manual é indicada para:

- •Cadeias Musculares.
- •Osteopatia
- •Maitland
- •Mulligan
- •Reeducação Postural Global.
- •E outras técnicas de terapia manual.

{tab=Características}

A MC Físio é firme e resistente. Sua estrutura metálica é toda construída em aço carbono e seu acabamento é feito em pintura eletrostática seguindo o mais rigoroso padrão de qualidade, conferindo beleza e resistência a impactos.

O estofamento é constituído em material anti-mofo, o mesmo utilizado em embarcações náuticas e a espuma utilizada é de densidade D60.

O tampo é construído em MDF possuindo sistema desenvolvido pela Carceroni que os parafusos não se soltam, portanto permite que a maca possa ser transportada pelo tanto.

ÁREA FÍSICA:

A área física mínima necessária de ocupação do divã é de 2,26m x 1,40m

CONTROLES:

O controle tanto de subida e descida é acionado através do controle manual, caso você tenha optado por pedal (opção que deverá ser feita na aquisição do equipamento).

{yoogallery src=[/images/stories/prod/controle/]style=[lightbox] load_lightbox=[1]}

CARGA:

O divã elétrica motorizado suporta 150 kg. de peso na base principal, porém os braços e a cabeceiras Não! Portanto nunca deixe o paciente sentar ou subir na maca do lado dos braços e da cabeceira.

OS BRAÇOS:

O sistema dos braços articulados e deslizantes, também foi desenvolvido pela Carceroni, possuindo registro de patente industrial (MU), permite que os braços do paciente sejam posicionados em diversas amplitudes do movimento articular independente da estatura que ele possa apresentar.

A CABEÇEIRA:

O sistema de cabeceira retrátil articulada, também é outro sistema desenvolvido pela Carceroni, possuindo registro de patente industrial (MU), permite que o paciente se posicione em decúbito ventral sem que esta posição produza incomodo os seja de alguma forma claustrofóbica, podendo também auxiliar o terapeuta à correção da cifose o mesmo procedimento poderá ser realizado em decúbito ventral.

{yoogallery src=[/images/stories/prod/cabeceira/]style=[lightbox] load_lightbox=[1]}

Características Técnicas:

- Alimentação: 110 ou 220 VAC – 60 Hz.
- Motor 24 VAC.
- Força: 6000N (Empurrando a carga)
- Força máxima 10.000N (Empurrando a carga)
- Velocidade: 8,2 mm/s sem carga e 4,0mm/s com carga
- Proteção: IP 54
- Ciclo de trabalho: 10% ou 6min./hora em uso contínuo
- Temperatura ambiente: +5Ú a +40ÚC
- Carga Máx. 150 kg.
- Peso com embalagem: 81 kg.
- Dimensões embalagem: 72 X 70 X 185 cm.
- Consumo: 7 A
- Ruído: Abaixo de 40db

{tab=Acessórios}

POSTURADOR:

O posturador foi um aparato desenvolvido para técnicas de posturas das cadeias posteriores. Substituindo as antigas cordinhas que não dão estabilidades ao paciente durante está técnica. É um aparato que suporta bem o peso dos membros inferiores do seu paciente. Possuindo regulagem em diversos graus de um arco de movimento do quadril (15º A 180º) e do comprimento do membro inferior. Como proceder a regulagem, posicione o seu posturador de acordo com a flexibilidade de seu paciente e com a altura em que os seus tendões calcaneares não fiquem em apoio ou sofra pressão, portanto deve-se posicionar logo a baixo dos tendões calcaneares. O POSTURADOR, também é outro sistema desenvolvido pela Carceroni, possuindo registro de patente industrial (MU).

IMPORTANTE: Ao adquirir o posturador é importante informa qual é a maneabilidade do terapeuta, pois nos da Carceroni pensamos até nisso, então você deverá informar se é destro ou sinistro.

{yogallery src=[/images/stories/prod/posturador/]style=[lightbox] load_lightbox=[1]}

AQUECIMENTO:

Sua maca poderá vir dotada com um sistema de aquecimento, evitando que seu paciente sinta um desconforto com o contato inicial com a superfície sintética do estofamento.

RODÍZIOS:

Sistema desenvolvido pela Carceroni, justamente para atender aos profissionais que possuem um espaço reduzido em seu consultório, permitindo que após ou durante as sessões a maca possa ser deslocada para qualquer local deixando o espaço mais amplo para melhor desenvolvimento de sua técnica.

CANALETA PARA PROTEÇÃO DOS FIOS:

Para ser fixado ao chão do consultório ou local onde a instalação da maca foi feita. Portanto evitando que os fios possam ser motivos de acidentes tanto para o terapeuta como para o seu paciente.

PEDAIS DE CONTROLE:

Durante a aquisição você fará a opção por controlador manual ou por pedais. Esta opção terá um custo extra. Sendo que a maca vem com controle manual já instalado.

ATUADOR COM NOBREAK:

Ao adquirir sua maca elétrica ou divã elétrico motorizado você poderá fazer a opção em adquirir este sistema que poderá lhe auxiliar durante a falta de energia elétrica.

KIT PROTETOR PARA CABEÇA, BRAÇOS E PÉS (TNT) DESCARTÁVEL:

Constituído em TNT e elástico nas extremidades servindo de proteção e de higienização para sua maca, conferindo beleza e praticidade. CORES: (Branco, Bege, Azul claro, Azul escuro...

KIT PROTETOR PARA CABEÇA, BRAÇOS E PÉS (Plástico 1,0mm)

MOCHO ERGONÔMICO:

Desenvolvido pela Carceroni com acento em fibra de vidro, leve, resistente em espuma D 60, revestimento anti-mofo, o mesmo utilizado em embarcações náuticas, base regulável a gás. É muito confortável! Permite ao terapeuta uma posição confortável durante um prolongado período em que esteja realizando um procedimento. Excelente acessório, quando necessitamos de atender o paciente na posição sentada, permite que o dorso fique livre do encosto da maioria das cadeiras. O Mocho Ergonômico posiciona a pelve corretamente em neutro, evitando que ela possa entrar em anteversão ou em retroversão.

PASTA PARA LIMPEZA:

Ao adquirir a maca elétrica vem acompanhada de uma pasta especial desenvolvida por químico contratado pela Carceroni, para conservação do estofamento. A pasta de limpeza é de fácil utilização, apenas com um pano umedecido em água proporcionará uma maior duração do material de revestimento. Esta limpeza deverá ser realizada quinzenalmente. Capa ou lençóis de proteção em TNT poderão ser adquiridos.

{tab=Garantia} CERTIFICADO DE GARANTIA:

Este equipamento é garantido pela Carceroni Produtos Médicos e Fisioterápicos Ltda., por um período estabelecido

por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

1º - A Carceroni Produtos Médicos Fisioterápicos Ltda. Assegura ao proprietário consumidor deste equipamento a garantia de 1095 dias (90 dias legais mais 1005 adicionais) no equipamento mecânico. **CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO, CONFORME EXPRESSO NA NOTA FISCAL DE COMPRA**, que passa a fazer parte deste certificado

2º - **NOTA IMPORTANTE:** O atuador, a caixa de comando e seu controlador. São garantidos pelo fabricante, por tempo determinado pela lei de 365 dias. Esta garantia é vinculada a nota fiscal emitida pela Carceroni Produtos Médicos Fisioterápicos Ltda. Fica também excluída da garantia os acessórios que acompanham o aparelho e o seu material de revestimento (Estofamento)

3º - Este Equipamento perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido ou em desacordo com o seu manual de operação.
- O equipamento for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada.
- O equipamento for ligado à fonte de energia (rede elétrica, pilhas, baterias, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de operação e/ou equipamento.

4º - Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de operação do equipamento, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agente da natureza e acidente.

5º - Excluem-se igualmente desta garantia os defeitos decorrentes do uso do equipamento em serviços que não se destina regular ou em desacordo com o uso recomendado.

6º - As despesas de transporte do equipamento e/ ou do técnico autorizado correm por conta do Senhor consumidor requerente do serviço.

7º - Caso o defeito constatado seja de responsabilidade do fabricante, teremos 90 (noventa) dias úteis para reposição do produto em questão

{/tabs}