

PODOTERMAX

{yogallery src=[/images/stories/prod/podotermax]}

Com a chegada no Brasil de diversas técnicas para confecção de palmilhas, surgiu a necessidade do desenvolvimento de um equipamento totalmente nacional que substituísse ou que concorresse em preço e qualidade com os importados de difícil processo de importação e principalmente pelo alto custo.

Assim nós da Carceroni desenvolvemos um grupo de equipamentos voltados para a avaliação e para a confecção de palmilhas, que consistem em:

- PODOTERMAX (Termomoldadora)
- PODOLIX (Podolixadeira)
- PODOVISION (Podoscópio para avaliação dos pés)
- PODOPRESS (Auxilia na termomoldagem das palmilhas)

{tab=PODOTERMAX}

A PODOTERMAX é uma termomoldadora dotada de uma câmara a vácuo e de uma resistência elétrica com temperaturas pré-estabelecida de acordo com cada material a ser utilizado para a união das interfaces de EVA e resinas utilizadas nas palmilhas

Sua estrutura metálica é toda construída em aço carbono e seu acabamento é feito em pintura eletrostática seguindo o mais rigoroso padrão de qualidade, conferindo beleza e resistência a impactos.

Seu ruído é muito abaixo e sua área de colagem é a maior das existentes no mercado, justamente pelo desenvolvimento e pesquisas realizadas pela Carceroni para atingir este objetivo.

Nossa resistência elétrica foi preparada para não propagar o calor para o seu gabinete, portanto somente o local de colagem detém o calor.

{tab=Características e Acessórios}

FOTOS

Características Técnicas:

Alimentação: 110 ou 220 VAC – 60 Hz.

Refrigeração: 2 Ventoinhas 80 x 80 x 34 mm

Fusível Máximo: 15 - 10A.

Resistência: 1000 w

Temperatura regulável: 20 – 130 ÚC

Temperatura ambiente para o uso: 5 - 40ÚC

Minuteria: 0 – 10 minutos

Superfície de moldagem: 335 x 455 mm

Dimensões: 520 x 400 x 240 mm

Dimensões da embalagem: 580 x 520 x 310 mm

Peso: 36 kg.

Peso com a embalagem: 42 kg.

Vazão: 40 LPM

Pressão Máxima: 8bar

Vácuo Máximo: 635 mm Hg

Potência do Motor: 1/5 HP

RPM: 1750

Ruído: 55,1 – 55,8 dB à distância de 1 metro.

Acessórios:

- 2 Botas para modelagem a vácuo
- 1 Cânula para termomoldagem
- 1 Tira elástica para fixação da bota
- 1 Peça de Armalon 0,13mm antiaderente do tamanho a área de aquecimento.

{tab=Utilização}

Este equipamento foi projetado e produzido dentro das mais rigorosas normas de segurança, portanto para usufruir melhor dessa segurança e obter o melhor desempenho e funcionamento do seu aparelho, siga estas recomendações.

- **UTILIZAÇÃO:** A utilização da PODOTERMAX deve ser feita por pessoal devidamente treinado e orientadas pelo fisioterapeuta. Não deixe cair nenhuma substância líquida nos motores, ou na caixa de comando da fonte alimentadora, com risco de causar sérios danos ao equipamento.

- **LOCAL:** A escolha do local para a colocação da PODOTERMAX é de suma importância. O local deverá ser firme, arejado, seco e livre de impurezas. A PODOTERMAX vem dotada de um filtro em seu sistema, mesmo assim é importante que a bancada permaneça limpa, pois se trata de um equipamento de aspiração, podendo sugar partículas de pó danificando assim o seu sistema. Deve-se evitar a colocação da PODOLIX na mesma bancada em que se encontrar a PODOTERMAX.

- **CÂMARA A VÁCUO – MANTA DE SILICONE:** A superfície superior da câmara a vácuo é dotada de uma manta de silicone translúcido, material de alta resistência ao calor. Devendo ser evitado de todas as maneiras a colocação de qualquer tipo de material sobre esta superfície, principalmente os de formas pontiagudas.

- **MANUTENÇÃO;** Não abra o compartimento do motor ou qualquer outra parte da PODOTERMAX, pois não existem partes reparáveis pelo usuário. Isto sempre deve ser feito por técnicos especializados, devidamente credenciados.

{tab=Garantia}**CERTIFICADO DE GARANTIA:**

Este equipamento é garantido pela Carceroni Produtos Médicos e Fisioterápicos Ltda., por um período estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

1º - A Carceroni Produtos Médicos Fisioterápicos Ltda. Assegura ao proprietário consumidor deste equipamento a

garantia de 365 dias (90 dias legais mais 275 adicionais) no equipamento mecânico. CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO, CONFORME EXPRESSO NA NOTA FISCAL DE COMPRA, que passa a fazer parte deste certificado

2º - NOTA IMPORTANTE: Fica também excluída da garantia os acessórios que acompanham o aparelho e sua cobertura de silicone translúcida se detectado rasgo ou furo de qualquer natureza. (O equipamento sai da fábrica devidamente testado, só serão aceitas reclamações em um prazo de 48 horas após o recebimento do equipamento pelo consumidor).

3º - Este Equipamento perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido ou em desacordo com o seu manual de operação.
- O equipamento for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada.
- O equipamento for ligado à fonte de energia (rede elétrica, pilhas, baterias, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de operação e/ou equipamento.

4º - Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de operação do equipamento, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agente da natureza e acidente.

5º - Excluem-se igualmente desta garantia os defeitos decorrentes do uso do equipamento em serviços que não se destina regular ou em desacordo com o uso recomendado.

6º - As despesas de transporte do equipamento e/ ou do técnico autorizado correm por conta do Senhor consumidor requerente do serviço.

7º - Caso o defeito constatado seja de responsabilidade do fabricante, teremos 90 (noventa) dias úteis para reposição do produto em questão

{/tabs}